

简介

3F1 双固化是一款氟化物释放型不透射线的自酸蚀、自粘接材料。这款材料使用自动混合头输送,在环境光下的工作时间为 1.5 至 3.5 分钟(取决于温度),并且在自固化模式下的口腔内固化时间为 2.5 至 4.5 分钟。在去除多余材料之前,可以等待材料粘性固化,并使用卤素、等离子弧灯或 LED 灯在边缘进行光固化。



3F1 双固化粘接材料以套装形式供应,其中包含一个混合注射器(4.0g×2)、10 个自动混合注射头。颜色有透明、遮色、牙齿色、牙龈色四种颜色可供选择。

3F1 双固化粘接材料



比色板



适应范围

1. 粘接牙冠和牙桥,嵌体和高嵌体。
2. 粘接陶瓷牙冠。
3. 粘接桩柱和桩核。

特性

1. 在粘接永久性修复体之前不需要酸蚀、预处理底涂或粘合;
2. 自固化水门汀,可以通过光固化实现立即凝结并加强边缘强度;
3. 不透射线-在射线照相中很容易看到;
4. 氟化物-已知可减少继发龋齿的可能性并有助于预防龋齿;
5. 自动混合注射器-节省操作时间,保证一致的混合度;
6. 几乎无味道或气味-增加患者舒适度。


技术数据

抗压强度	180Mpa
抗弯强度	170Mpa
吸水率	8ug/mm ³
溶解度	1ug/mm ³
与未酸蚀的牙釉质的粘合力	>20Mpa
与未酸蚀的牙本质的粘合力	>15Mpa
涂膜厚度	10um
不透射线性 (铝材%)	250
固化时间 (口腔温度)	2.5-4.5 分钟
兼容卤素灯	是
兼容等离子弧灯	是
兼容 LED 灯	是


评估亮点

兼容卤素灯、LED 灯和等离子弧灯。

- 1.易于输送和放置。
- 2.粘度好。
- 3.不透射线。
- 4.高效。
- 5.易于清理。
- 6.双重固化。

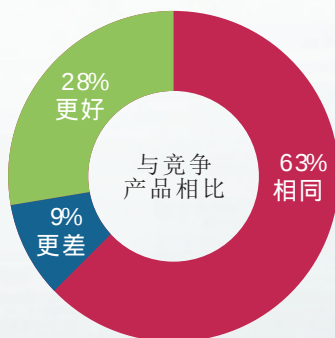

愿意转用或推荐的顾问比例

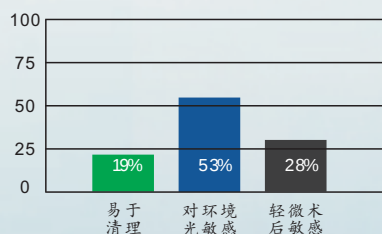


包装规格

- 1 支装 4.0g×2
- 2 支装 4.0g×2+4.0g×2



主要特点

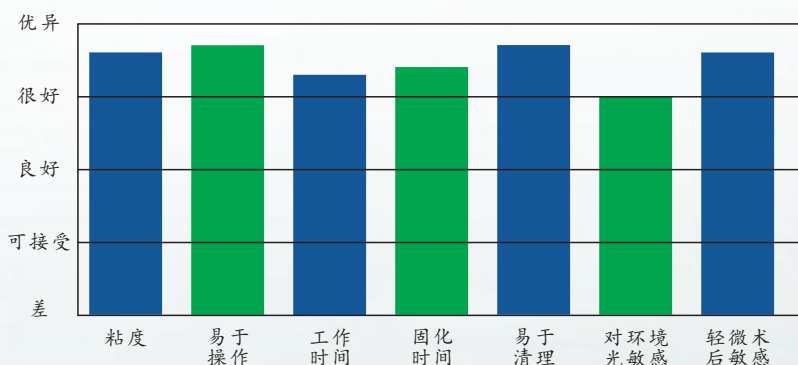

顾问评论

1. “用于短冠制作和桩柱粘接的优秀产品;”
2. “粘度很好-可保持在放置位置;”
3. “当材料在环境光下快速固化时,我发现其在固定半透明桩柱时非常有用;
4. “良好的不透射线性;”
5. “提供的混合头非常好;”
6. “半透明外观非常适合烤瓷牙贴面,并适用于陶瓷嵌体和高嵌体;”
7. “我希望在粘性固化之前能够无需等待。”
8. “自固化的工作和固化时间有点太快了。”

临床评价

- 1.为了便于处理,将其从冰箱中取出后恢复至室温;
- 2.请注意,对于金属修复体,固化时间更长;
- 3.在去除多余的水门汀之前,等待水门汀粘性固化 5 秒钟;
- 4.工作时请勿将操作灯照射着注射器 -如果你的高倍放大镜上配置了灯泡,请注意。

呈现乳光效果,更逼真自然

